


Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS

Datenblatt-Nr.: 300590 / Stand: 2024/09/01

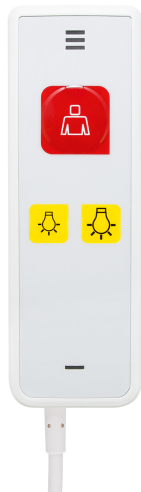

Hersteller: hospicall GmbH

Produkt: Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS

Artikelnummer: 300590

Bezeichnung neu: Patientenhandgerät PHG-RT-LS-NS

Kurzbeschreibung neu: PHG-RT-LS-NS

Bezeichnung alt: Patientenhandgerät mit Ruftaste, 2 Lichttasten, Lautsprecher und Mikrofon P7

Kurzbeschreibung alt: PHG7

Verwendung: Rufsystem P7

Jedem Bett muss eine Einrichtung zur Rufauslösung zugeordnet sein, die vom Patienten bequem und sicher erreichbar ist. Die Handgeräte von hospicall erfüllen nicht nur diese Anforderung der DIN VDE 0834-1, sondern berücksichtigen neben der intuitiven Bedienung durch die Patienten/Bewohner auch die Belange des Pflegedienstes bzw. der Haustechnik.

Patientenhandgeräte PHG-RT-LS-NS sind Handgeräte für die diskrete Kommunikation im Patienten-/Bewohnerumfeld und verfügen über eine leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit großer transluzenter Ruftaste, integriertem Finde-/Beruhigungslicht, eine Mikrofon-/Lautsprecherkombination mit digitalem Signalprozessor für erstklassige diskrete Sprachkommunikation sowie einem berührungslosen Schaltkontakt zur Umschaltung zwischen offener und diskreter Kommunikation in Verbindung mit geeignetem Wandhalter, zwei Lichttasten gelb, zur Steuerung von Lichtquellen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht) über ein Stromstoßrelais sowie eine drei Meter langer Anschlusschnur mit Stecker. Der Systemanschluss und die Funktionsüberwachung erfolgen über Wandeinheiten mit Nebensteckkontakt (NS)

Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung durch Ruftaste rot, mit Pflegedienstsymbol, Findelicht (schwach leuchtend) im Ruhezustand und Beruhigungslicht (hell leuchtend) zur Signalisierung der Rufauslösung

- Hygienische, leicht zu reinigende antibakterielle Folientastatur mit erhabenen Tasten und eindeutigem Druckpunkt für eine sichere Bedienung
- Steuerung von bis zwei Lichtquellen über Tasten gelb, mit Lampensymbolen (Raumlicht, Bettenlicht/Leselicht)
- Diskrete Kommunikation mit dem Pflegedienst über integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Automatisches Umschalten zwischen diskreter Sprache und freier Sprache bei Positionierung des Geräts in zugehörigem und mit einem Magneten versehenen Wandhalter
- Die Komfortfunktion diskrete Sprachkommunikation erfordert den Anschluss an eine geeignete Kombination von sprachfähigem Zimmerterminal und Wandeinheit
- Empfohlenes Zubehör:
- Bettgalgenclip zur sicheren Befestigung des Gerätekabels am Bett, Art. Nr. 310429
- Wandhalter ZUS-WH-PHG, Art. Nr. 300591
- Optional Anschlussverlängerung zwei Meter mit DIN-Stecker rund, 7-polig, ZUS-AS-VL-2M-NS; Art. Nr. 310440
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

Technische Daten

Versorgungsspannung: 12 V DC

Stromaufnahme aktiv: 16 mA, passiv: 11 mA

Batterietyp:

Gewicht brutto: 210 g

Zertifizierung: CE, REACH, RoHS

Befestigung: stecken

Zum Anschluss an: NS

Zum Anschluss von:

Mechanische Eigenschaften

Maße (H x B x T): x 42 x 20 mm

Gewicht netto: 210 g

Material: ABS, PC

Montage:

Farbe: weiß ähnl. RAL 9010

Elektrische Schnittstellen:

- 1x Nebensteckkontakt NS - Modular 8P8C - SK - Bidirektional
- 1x Sprachkommunikation - Modular 8P8C - Z-Bus P7 - Bidirektional