

Montageanleitung für:



Art.: 30 05 10
ZT7

Art.: 30 05 11
ZT7-2T

Art.: 30 05 12
ZT7-OT

Art.: 30 05 15
ZT7O

Art.: 30 05 13
ZT7O-2T

Art.: 30 05 16
ZT7O-OT

Art.: 30 05 20
ZT7-D

Art.: 30 05 21
ZT7-D2T


Art.: 30 05 25
ZT7O-D

Art.: 30 05 26
ZT7O-D2T

Verdrahtungsplan, empfohlene Montagehöhen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Rückseite.



hospicall GmbH
Max-Planck-Str. 3 · 51674 Wiehl
Tel.: +49 (0)2261 / 50 169-0
Fax.: +49 (0)2261 / 50 169-39
E-Mail: info@hospicall.com
Web: www.hospicall.com

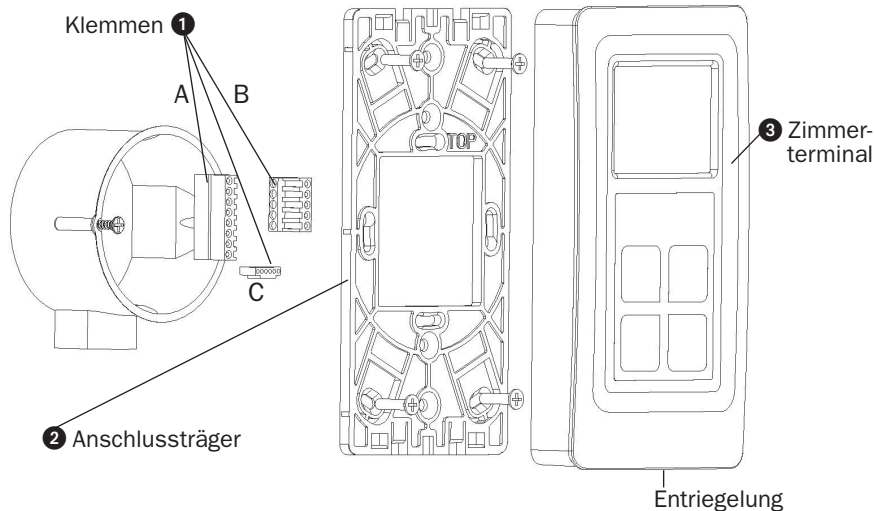

1. Kabel nach umseitigem Verdrahtungsplan an den beiden Schraub-/Steckklemmen ① (A + B) anschließen. Beim letzten Modul im Stationsbus wird der Abschlusswiderstand (C) gesteckt.
2. Anschlussträger ② mit 4 Schrauben befestigen. Hierbei die Markierung „TOP“ (oben) beachten.
3. Die angeschlossenen Klemmen ① durch den Anschlussträger ② führen und an das Zimmerterminal ③ anschließen.
4. Zimmerterminal auf dem Anschlussträger ② einrasten.

Montage und Anschluss von Rufanlagen ist nur nach erfolgter Schulung zulässig.
Gefahr! Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbaumgebung.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Montageanleitung für:



Art.: 30 05 10
ZT7

Art.: 30 05 11
ZT7-2T

Art.: 30 05 12
ZT7-OT

Art.: 30 05 15
ZT7O

Art.: 30 05 13
ZT7O-2T

Art.: 30 05 16
ZT7O-OT

Art.: 30 05 20
ZT7-D

Art.: 30 05 21
ZT7-D2T


Art.: 30 05 25
ZT7O-D

Art.: 30 05 26
ZT7O-D2T

Verdrahtungsplan, empfohlene Montagehöhen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Rückseite.



hospicall GmbH
Max-Planck-Str. 3 · 51674 Wiehl
Tel.: +49 (0)2261 / 50 169-0
Fax.: +49 (0)2261 / 50 169-39
E-Mail: info@hospicall.com
Web: www.hospicall.com

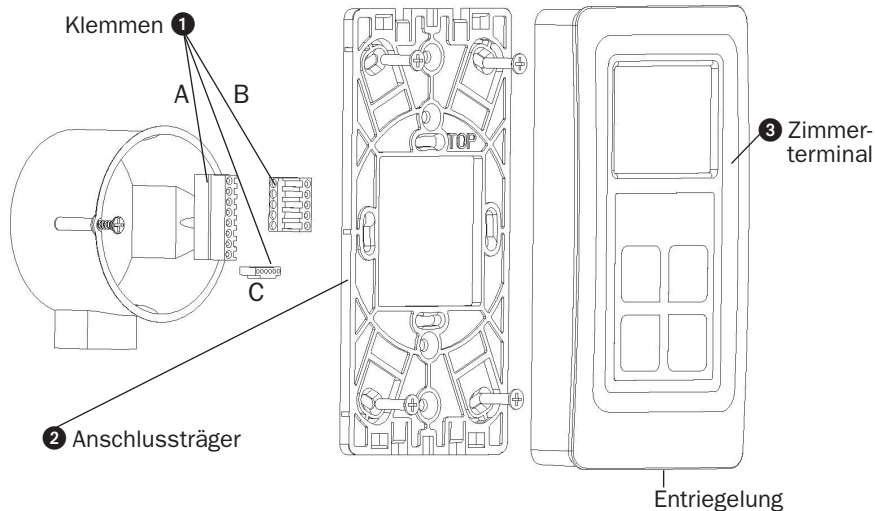

1. Kabel nach umseitigem Verdrahtungsplan an den beiden Schraub-/Steckklemmen ① (A + B) anschließen. Beim letzten Modul im Stationsbus wird der Abschlusswiderstand (C) gesteckt.
2. Anschlussträger ② mit 4 Schrauben befestigen. Hierbei die Markierung „TOP“ (oben) beachten.
3. Die angeschlossenen Klemmen ① durch den Anschlussträger ② führen und an das Zimmerterminal ③ anschließen.
4. Zimmerterminal auf dem Anschlussträger ② einrasten.


Montage und Anschluss von Rufanlagen ist nur nach erfolgter Schulung zulässig.
Gefahr! Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbaumgebung.
Elektrischer Schlag kann zum Tod führen. Vor Arbeiten am Gerät freischalten und spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

Sicherheitshinweise:

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Bei der Installation von Rufanlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 einzuhalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

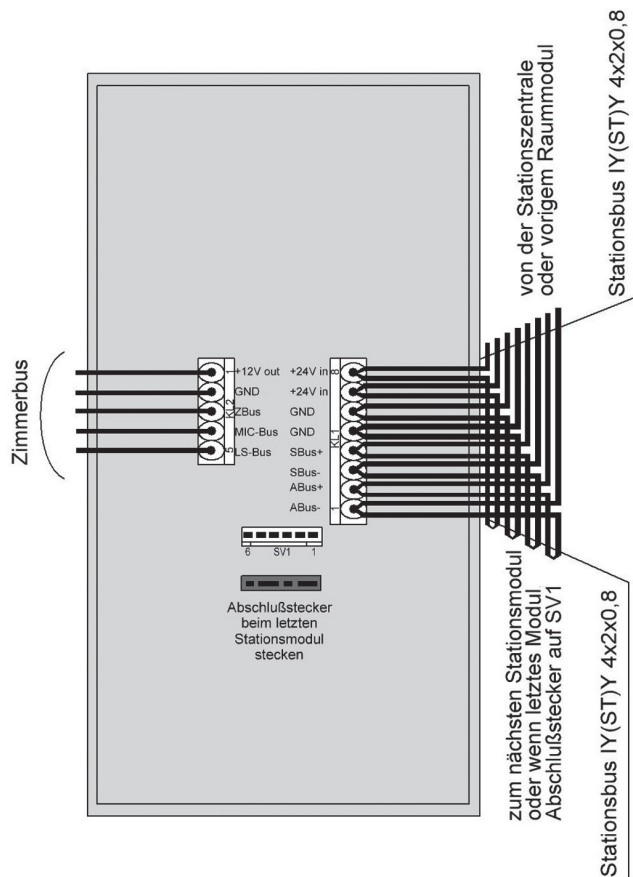

Montagehöhen nach DIN VDE 0834

In der DIN VDE 0834 werden die Montagehöhen für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen vorgegeben.

Zugtaster mindestens 20 cm über der höchstmöglichen Position des Brausekopfes. Die Zugschnur muss bis 10 cm über den Boden reichen und liegend erreichbar sein.

Geräte zum Bedienen
0,7 - 1,5 m über dem Fußboden

Geräte zum Bedienen mit Textanzeige
1,5 - 1,7 m über dem Fußboden

Geräte mit Installationseinheiten (Medizinische Versorgungseinheiten)
1,6 - 1,8 m über dem Fußboden

Signalleuchten und Großtextanzeigen
1,5 - 2,2 m über dem Fußboden


Die DIN 18024-2 „Barrierefreies Bauen“ schreibt darüber hinaus vor, dass Bedienelemente für Rollstuhlfahrer in einer Höhe von 0,85 m montiert werden müssen.

Sicherheitshinweise:

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Bei der Installation von Rufanlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für Fernmeldeanlagen nach VDE 0800 einzuhalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

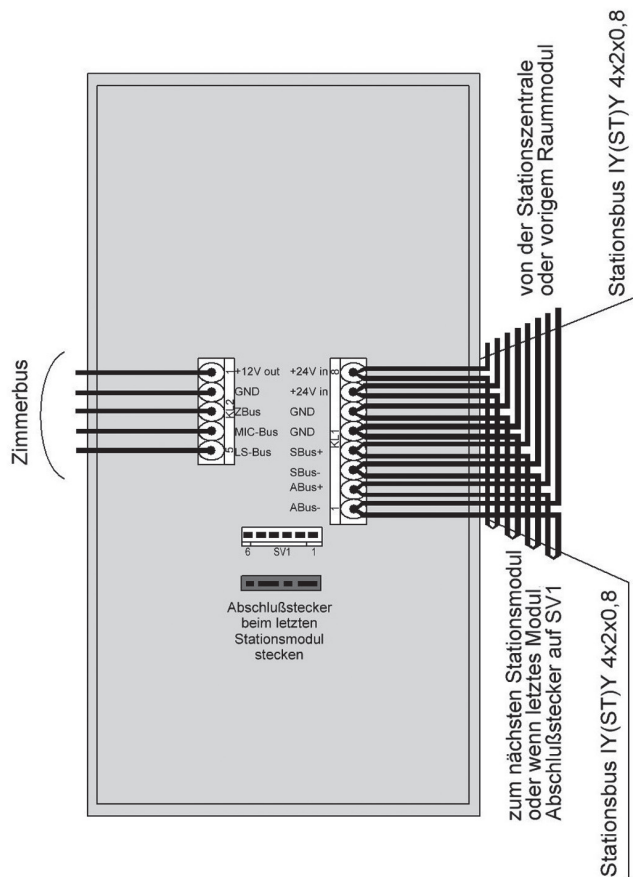

Montagehöhen nach DIN VDE 0834

In der DIN VDE 0834 werden die Montagehöhen für Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen vorgegeben.

Zugtaster mindestens 20 cm über der höchstmöglichen Position des Brausekopfes. Die Zugschnur muss bis 10 cm über den Boden reichen und liegend erreichbar sein.

Geräte zum Bedienen
0,7 - 1,5 m über dem Fußboden

Geräte zum Bedienen mit Textanzeige
1,5 - 1,7 m über dem Fußboden

Geräte mit Installationseinheiten (Medizinische Versorgungseinheiten)
1,6 - 1,8 m über dem Fußboden

Signalleuchten und Großtextanzeigen
1,5 - 2,2 m über dem Fußboden

Die DIN 18024-2 „Barrierefreies Bauen“ schreibt darüber hinaus vor, dass Bedienelemente für Rollstuhlfahrer in einer Höhe von 0,85 m montiert werden müssen.